



PROVTAGNING: Ta prov genom att rotera pinnen på tonsillerna, bakre delen av svalget och på ev vita fläckar i tonsillområdet. Undvik kontakt med tand-, gom-, tung- eller kindområdet.

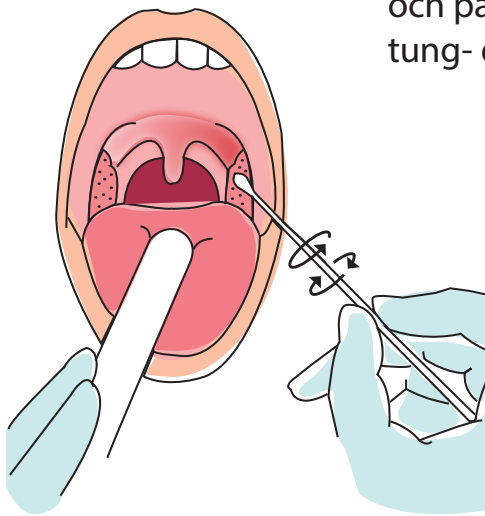

UTFÖRANDE AV ANALYZ STREP A


1

Droppa 4 droppar av **Reagens 1** ned i röret.

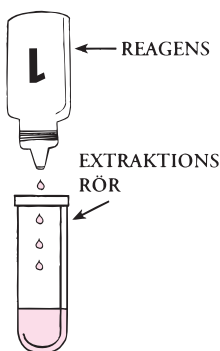

2

Droppa 4 droppar av **Reagens 2** ned i röret. Vätskan ändrar färg från rosa till svagt gult.

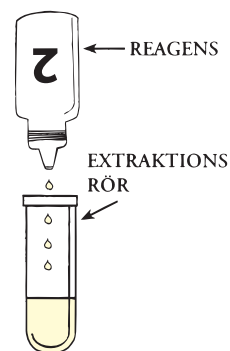


3

1 minut




För provpinnen ned i röret. Snurra provpinnen ordentligt i vätskan. Tryck samtidigt pinnens topp mot rörets botten, och **låt stå minst 1 minut.**

PROVPINNE

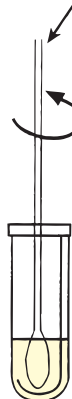

4

Pressa ur all vätska ur provtagningspinnen mot insidan av röret. Kläm ihop om provtagningspinnen när den tas ur röret. Kasta provtagningspinnen.

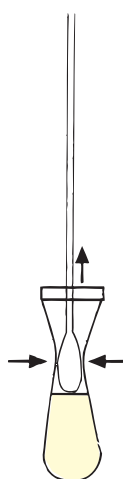

5

5 minuter



Ställ ner testremsan i röret. Avläsning skall ske vid **5 minuter**, ej senare.

HÅLL HÄR



AVLÄSNING AV TEST

Så fort du ser en röd och en blå linje kan testet läsas som positivt. Avläsning ska ske senast efter 5 minuter."

Färgintensiteten kan variera.

Även en svag röd linje ska betraktas som positivt test.

