

Snabbbeskrivning

Clearview® Exact Strep A Dipstick

Provtagning



Ta prov genom att rotera pinnen på tonsillerna och bakre delen av svalget. Undvik kontakt med tand-, gom-, tung- eller kindområdet.

Prov ska tas före reagens 1 och 2 blandas ihop.

Analys





1. Droppa 3 droppar av reagens 1 i röret. Lösningen ska vara rosa-lila till färgen.

2. Droppa 3 droppar reagens 2 i röret. Blandningen ska nu ändra färg till gult.

3. Placera provpinnen i röret. Roterä provpinnen så att provet kommer i kontakt med lösningen. Låt stå i minst 1 minut och max 15 minuter.

4. Kläm ihop röret och vrid upp provpinnen så att vätskan pressas ur provpinnen. Kasta provpinnen.

5. Ställ teststicket med pilarna nedåt i röret. Läs av resultatet efter 5 minuter, aldrig senare än 10 minuter.

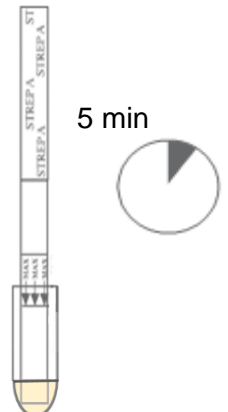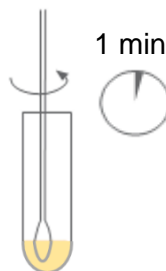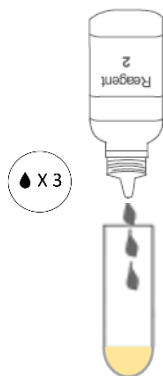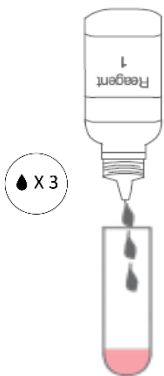


Avläsning av resultat

POSITIVT: Två rosafärgade linjer framträder. Utöver en rosafärgad linje i kontrollfältet, framträder även en rosafärgad linje i testfältet. Alla rosa färgnyanser i testfältet skall betraktas som positivt svar.

NEGATIVT: En rosafärgad linje framträder i kontrollfältet. Ingen rosa linje framträder i testfältet.

OGILTIGT: Ingen färgad linje framträder i kontrollfältet. Upprepa provtagning och analys. Om problemet kvarstår, kontakta support.

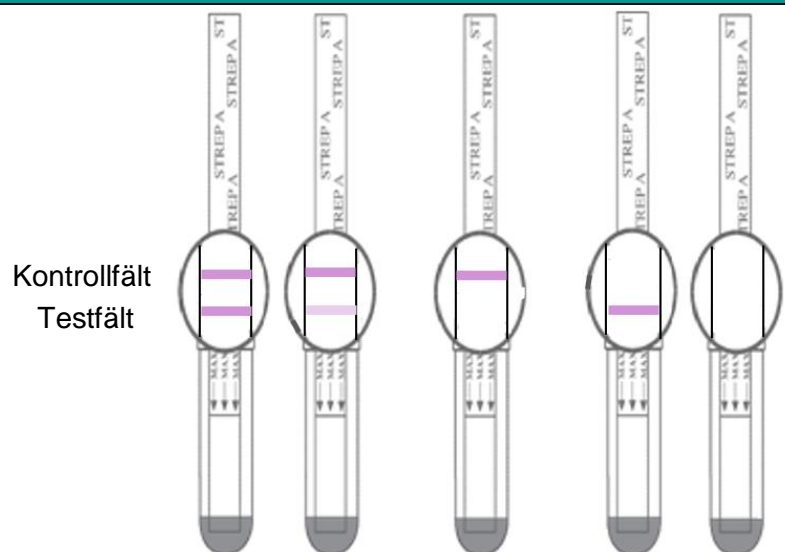

Positivt
Två linjer

Negativt
En linje
i kontrollfält

Ogiltigt
Ingen linje i
kontrollfält

För fullständig beskrivning se metodbeskrivning eller insert I fp.

