

## Information om Gke´s batchkontrolltest (PCD) av ångautoklaver

Gke Compact-PCD (art.nr 200-081 och 211-281) används för rutinkontroll av varje ångsteriliseringsprocess med avseende på otillräcklig luftborttagning, läckage i autoklaven och icke kondenserbara gaser i ångan. Denna PCD kontrollerar instrument för dentalt bruk (ej Hollow A).



	Tillräcklig temperatur, tid och ångpenetration
	Otillräcklig luftborttagning och ångpenetration
	Temperatur uppnådd, ingen luftborttagning eller ångpenetration
	Otillräcklig temperatur, ingen luftborttagning eller ångpenetration

### Bruksanvisning

1. Skruva av locket på behållaren och ta ut den vita indikatorhållaren. Vik indikatorremsan på mitten med de gula rutorna inåt och placera den i indikatorhållaren med öppningen riktad mot röret.
2. För in indikatorhållaren i metallbehållaren och skruva åt locket.
3. Efter körningen tas behållaren ut och öppnas. Metallbehållaren kan öppnas omgående om de 4 gula fälten slagit om till svart har luftevakueringen och ångpenetration genomförts på ett riktigt sätt och körningen är godkänd.
4. Baksidan på den använda indikatorremsan är självhäftande och kan efter användning fästas direkt på autoklavkurvan eller annan dokumentationshandling.

### Observera:

1. Gke´s Compact-PCD är optimerad beträffande volym och värmemotstånd med Gke´s egna indikatorer. Compact-PCD skall därför inte användas tillsammans med andra indikatorer från andra leverantörer.
2. Lagra indikatorerna i rumstemperatur och ej i direkt solljus. Indikatorerna skall inte lagras tillsammans med kemikalier, då avdunstningen från dessa kan skada indikatorerna.
3. Indikatorer vars utgångsdatum passerats skall ej användas. Indikatorerna kan kastas i de vanliga soporna.
4. Kontrollera att röret i Compact-PCD är torrt innan den används igen. Vid osäkerhet blås igenom röret med tryckluft.
5. I locket på indikatorhållaren finns en röd packning. Denna packning skall bytas 2 gånger per år. Denna packning finns bifogad i kartongen med indikatorer (art.nr. 211-255)

### Distributör för Sverige

Mediq Sverige AB  
Box 10302  
434 24 Kungsbacka

Telefon: 031-3889300  
Telefax: 08-973097  
E-mail: [kundservice.hospital@mediq.com](mailto:kundservice.hospital@mediq.com)  
Hemsida: [www.mediq.se](http://www.mediq.se)